

Featured Physicians†

Michael Gold, MD, FAAD
Nashville, TN




David Goldberg, MD, JD
Hackensack, NJ



Mary Lupo, MD
New Orleans, LA



David Harvey, MD, FAAD
Newnan, GA

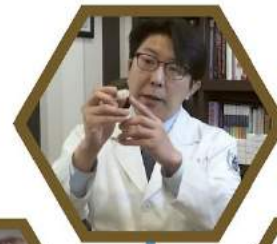

Tamella Cassis, MD, FAAD
Prospect, KY



David Shafer, MD, FACS
New York, NY



Joel Schlessinger, MD
Omaha, NE



Ava Shamban, MD
Beverly Hills, CA



Nark K. Rho, MD
Seoul, South Korea



Azadeh Amjadi, NP
New York, NY

† Safety information and approved uses can be reviewed and requested. AQUAVIT MAKES NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ANY RESPONSIBILITY FOR, THE INFORMATION OR TREATMENT THAT YOU MAY RECEIVE FROM ANY LISTED HEALTHCARE PROVIDER.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

JEDYNA W SWOIM RODZAJU, OPATENTOWANA
TECHNOLOGIA:

REPEATED MOTION MICROCHANNEL®



SPECYFIKACJA IGŁY:

Średnica

Każda igła ma średnicę wielkości 0.13 mm i jest cieńsza niż ludzki włos, co powoduje niewielki lub żaden ból podczas stosowania aplikatora.



mikroigła kanałowa
0.13mm




włos ludzki
0.18 mm

SPECYFIKACJA IGŁY:

Długość

- Igły mają 0.6 mm długości i wbijają się w naskórek i skórę właściwą. Pozwala to na głębokie rozprowadzenie preparatu w skórze.
- Naskórek jest wierzchnią warstwą skóry i ma średnią grubość 0.1 mm.

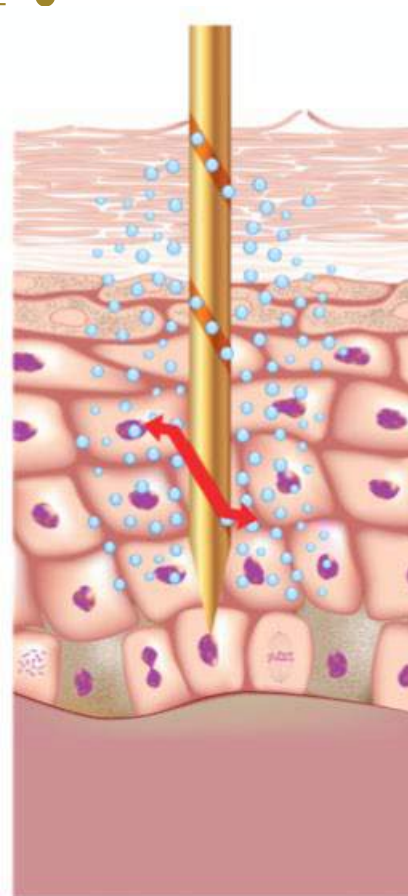


NASKÓREK

REPEATED MOTION TECHNIQUE

Opatentowana technika Repeated Motion
AQUAGOLD® fine touch.

Wizualizacja przedstawia prawidłowy
sposób użycia produktu.

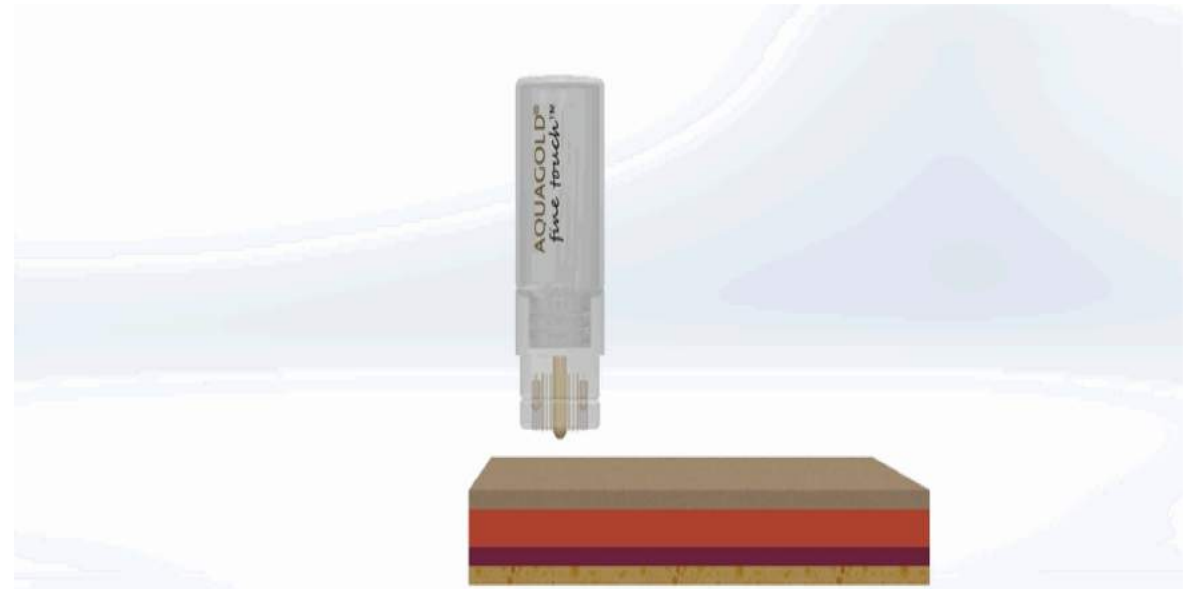

LECZENIE SPERSONALIZOWANE

Dr. Lupo

- 2ml soli fizjologicznej
- 0.2ml kwasu hialuronowego
- 0.3ml Lidokaina + Epinefryna
- 15jednostek toksyny botulinowej

Schemat ten został zaprezentowany na CME zatytułowanym "One syringe wonder" podczas Cosmetic Bootcamp w Aspen.

† Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zatwierdzonych zastosowań można przeglądać i żądać.
AQUAVIT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ I WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INFORMACJE LUB LECZENIE KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD
JAKIEKOLWIEK WYMIENIONYCH JEDNOSTEK MEDYCZNYCH



WĘGRY:

Dr. Bernadett Buda

“Przeprowadź dwie rundy aplikacji wymienionej ilości produktów na całą twarz. Następnie resztę która została rozpuść z 1ml/150mg Witaminy C i wykonaj trzecią rundę aplikacji. Rezultat jest fantastyczny!”



Dr. Bernadett Buda, Board-Certified ENT Surgeon, Budapest, Hungary†

† Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zatwierdzonych zastosowań można przeglądać i żądać.

AQUAVIT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ I WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INFORMACJE LUB LECZENIE KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JAKIEKOLWIEK WYMIENIONYCH JEDNOSTEK MEDYCZNYCH



OBECNE I PRZYSZŁE ZASTOSOWANIA

Poszerzające się zastosowania AbobotulinumtoxinA można wykorzystać za pomocą urządzenia medycznego AQUAGOLD®:

„Wykazano, że BoNT-A zmniejsza wydzielanie sebum i zmniejsza rozmiar porów u osób z tłustą skórą, prawdopodobnie poprzez blokowanie aktywność acetylocholino w sebocytach. BoNT może również wywierać swoje działanie poprzez działanie na gruczoły łojowe. Hamowanie HNEW acetylocholino jest również związane z zapobieganiem rumieniowi i uderzeniom zaczerwienienia -kluczo wym objawom trądziku różowatego - zostało wykazane u pacjentów z zespołem Freya”

[Cały artykuł dostępny na Aesthetic Surgery Journals](#)



John S. Imft, MD



Erin Gilbert, MD



Joel Cohen, MD



Joely Kaufman, MD



DZIĘKUJEMY



ATRADIS
AESTHETIC
MEDICINE